

# PROTECTORES FACIALES

Máscaras traslúcidas de policarbonato





PARTE DE LA SOLUCIÓN



Evitan el contacto directo entre personas, y son adaptables al usuario

 @dvpoficial  
 @dvpoficial  
[www.dvp.cl](http://www.dvp.cl)

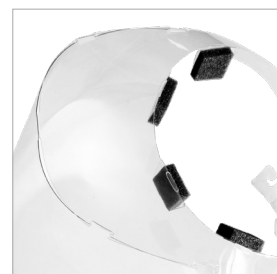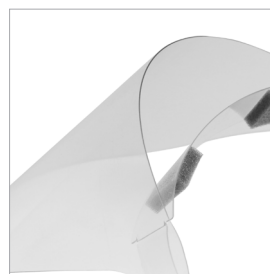



## PROTECTORES FACIALES

Máscaras translúcidas de policarbonato

Máscaras translúcidas de policarbonato para protección facial, reutilizables y reciclables. Evitan el contacto directo entre personas, son fáciles de limpiar y adaptables a la medida del usuario. Además son sencillas de armar y muy versátiles. Se pueden utilizar con otros elementos de seguridad como un casco o antiparras, y son un complemento perfecto a la mascarilla N95, aumentando su periodo de uso útil.



Excelente asilamiento



Fáciles de limpiar



Rápido y fácil armado



Excelente paso de la luz



Retardante del fuego



Durables en el tiempo



Firmes y resistentes



Contienen filtro UV



Livianas y cómodas



Ajustables a la medida

## Principales Atributos

- Dos modelos disponibles: Máscara Stop 10 Antiempañante y Máscara Stop 20.
- Incluyen set de 4 esponjitas para calce frontal más cómodo.
- Pueden ser utilizadas como complemento a las mascarillas N95.
- Compatibles con otros elementos como gorro y anteojos.
- Cubren de manera completa ojos, nariz y boca.
- Fáciles de limpiar y desinfectar.
- Extremos redondeados para mayor seguridad.
- Reutilizables y totalmente reciclables.
- Ideales para uso continuo durante largos períodos de tiempo.
- Disponible opción de personalizar máscara con branding.




## Máscara Stop 10 Antiempañante

- Máscara de Policarbonato.
- Contiene aditivo antiempañante por cara interior.

SKU	Unidad de venta	Formato
3021120007060	1 unidad	Unitario
3021120004060	25 unidades	Bolsa de 25 unidades
3021120005060	50 unidades	Bolsas unitarias
3021120003060	100 unidades	20 bolsas de 5 unidades c/u




### Instrucciones de Armado

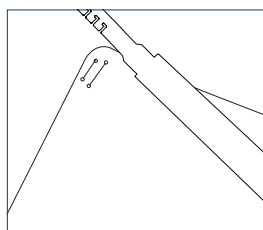


#### Paso N° 1

Presente ambas piezas, y disponga el cintillo por atrás del protector facial. Una vez armada el cintillo debe quedar en contacto con la frente.

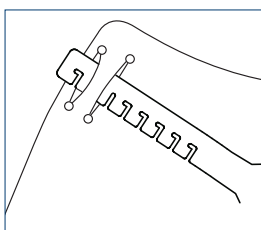


#### Paso N° 2

Introduzca uno de los extremos del cintillo en la primera ranura del protector, cuidando calzar de inmediato con la segunda ranura para extraer el cintillo.

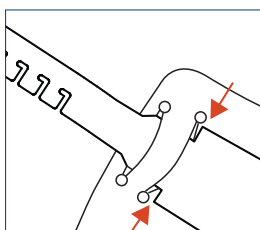


#### Paso N° 3

Deslice el cintillo por ambas ranuras, ejerciendo presión, hasta que el borde más ancho se encuentre con la primera ranura, quedando a tope con ella.

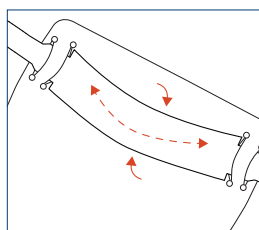

#### Paso N° 4

Repita con el otro extremo hasta tensar de manera completa. Notará que está bien ensamblada pues se formará un arco en el interior, entre ambas piezas.

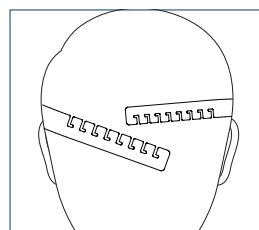

#### Paso N° 5

Para terminar, ponga el protector frontal sobre la cara, y rodee la cabeza con el cintillo. Luego ajuste ambos extremos en las ranuras para asegurar.


## Máscara Stop 20

- Máscara de Policarbonato.
- Aletas incorporadas en el caso de que se use gorra bajo ella.

SKU	Unidad de venta	Formato
3021120002060	1 unidad	Unitario
3021120001060	50 unidades	Bolsa de 50 unidades




### Instrucciones de Armado

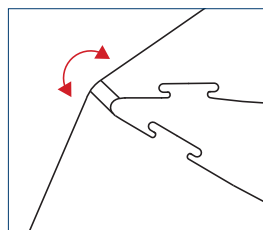


#### Paso N° 1

Ejerza presión sobre el puente central del protector y dóblelo formando un ángulo recto entre el escudo (frontal) y la visera.

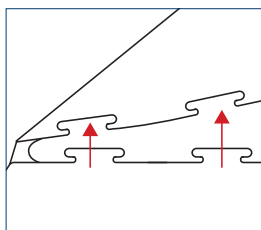


#### Paso N° 2

Enganche cada uno de los cuatro machos, con las cuatro hembras ejerciendo presión. Primero conecte el lado derecho y luego el izquierdo.

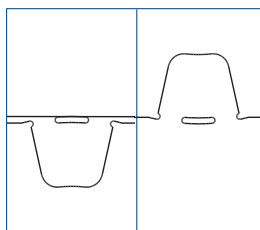


#### Paso N° 3

Luego doble las aletas superiores hacia abajo para más comodidad. En el caso de usar con gorro, se recomienda doblar las aletas hacia arriba.

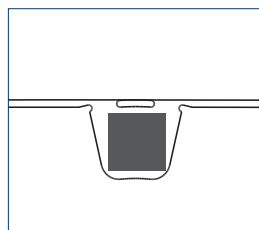

#### Paso N° 4

En el caso de usar con las aletas hacia abajo, pegar sobre cada una de ellas las esponjitas protectoras para calce más cómodo en la parte frontal.

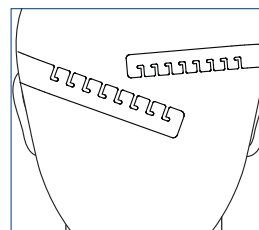

#### Paso N° 5

Ponga la máscara sobre el rostro y rodee la cabeza con las tiras conectoras. Ajuste a la medida de la cabeza del usuario y enganche los conectores.

## Soluciones a su Medida



La máscara STOP 20 DVP es compatible de usar con otros accesorios o elementos de seguridad como mascarillas, cascos, gorras o anteojos



Uso de máscara con casco



Uso con mascarilla y anteojos



Uso de máscara con gorra

## Máscaras Personalizadas


Las Máscaras Stop 10 y Stop 20 DVP también pueden ser personalizadas con la marca de su empresa, a través de la impresión de su logotipo en papel adhesivo de alta resistencia adherido sobre el protector facial.

Consulte por mínimo de máscaras para branding en: [policarbonatos@dvp.com](mailto:policarbonatos@dvp.com)



Ejemplos de aplicación de logotipo en máscaras Stop 10 y Stop 20.

## Recomendaciones de Limpieza

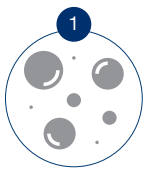

1 Primero limpie la máscara facial de policarbonato con una toalla humedecida con agua y jabón.



2 Arraste la materia orgánica por toda la superficie de contacto, primero la superficie interna y después la externa.



3 Seque la máscara con una toalla descartable.



4 Humedezca otra toalla con alcohol al 70°, y pásela por toda la superficie de contacto de la máscara.



5 Realice la limpieza en el mismo sentido y abarcando las mismas zonas donde se hizo la limpieza previa.



6 Mantenga la máscara protegida en su bolsa si no es utilizada.




7 Esta limpieza se debe ejecutar en área sucia.



8 El operador debe ejecutar higiene de manos después el procedimiento.

# innovación vanguardia Protectores Faciales calidad tecnología

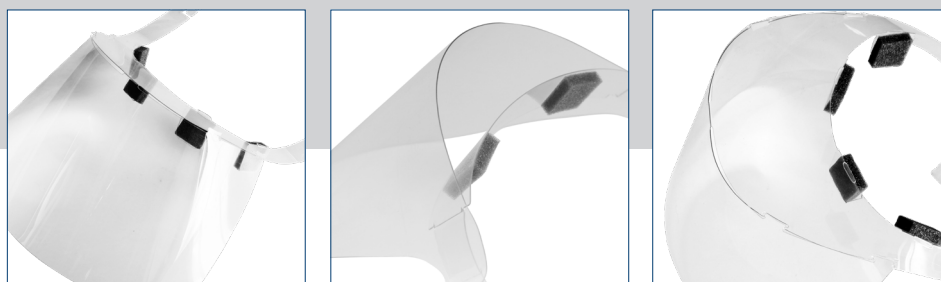

## PROTECTORES FACIALES

### *Máscaras traslúcidas de policarbonato*

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos proyectos e industrias



Distribuido y comercializado por DVP S.A.

Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - policarbonatos@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt

Más información en [www.dvp.cl](http://www.dvp.cl)